



### Användningsområden

Lämpligt för glas, porslin, rostfritt, aluminium, plast och känsliga material som t.ex. eloxerad och färgad aluminium i alla vatten. Ger ett rent och hygiensiskt resultat på sjukvårdsgods, instrument etc. Lämpligt för köksdisk där man vill ha ett icke frätande diskmedel av t.ex. arbetsmiljöskäl.

### Produktegenskaper

Lågalkaliskt maskindiskmedel för diskmaskiner, disk- och spoldesinfektorer.

### Produktfördelar

- Effektivt och hygieniskt diskmedel för sjukvårdsmateriel.
- Ej frätande
- Innehåller ej fosfater, NTA eller EDTA

Benämning	Fornax
Produktgrupp	Maskindiskmedel
Utseende	Klar, gulbrun vätska
Densitet (20 °C)	1210 kg/m <sup>3</sup>
pH Koncentrat	ca 10
pH Brukslösning	ca 9

### Doseringsanvisning

Fornax är avsett för automatisk dosering enligt maskintillverkarens anvisningar och enhetens interna rutiner. Rekommenderat temperaturintervall för användning: 35-65°C

Riktdoseringar:

Köksdisk: 0,3 -1 ml/liter diskvatten beroende på smutsbelastning.

Disk- och spoldesinfektorer: 1-3 ml/liter vatten.

Produkten är optimerad för mjukt och medelhårt vatten.

### Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
11525	5 liter dunk	3

### Transport och förvaring

Tål temperaturer ner till -5°C

### Säkerhetsföreskrifter

Stänk i ögonen av koncentrerad produkt ger irritation. Skölj med vatten. Undvik långvarig hudkontakt, verkar uttorkande/irriterande. Skölj med vatten. Se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information. Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

