

Perform[®]



Produkttyp

Syreavspjälkande desinfektionsmedel i pulverform

Användningsområden

Desinfektion och rengöring av alla slags ytor där mycket höga krav ställs, t.ex. inom tand- och sjukvården, veterinärmedicin, idrottsanläggningar, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Perform har låg toxisk effekt på människor. Eftersköljning är ej nödvändig.

Perform[®] kan t.o.m. användas på material som annars kan vara problematiska att desinficera såsom t.ex. plexiglas i inkubatorer

Mikrobiologisk effektivitet

Perform är effektiv mot:

- Bakterier (inkl. TbB) • Svamp • Hepatit B virus • HIV • Rotavirus
- Adenovirus • Poliovirus • Vaccinia virus • Sporer • Polyoma SV 40

Produktinformation

Sammansättning

100 g innehåller 45 g Pentakalium-bis-(peroximonosulfat)bis(sulfat).

Innehållsförteckning enligt EU förordning 648/2004:

5-15% anjoniska tensider; <5% nonjoniska tensider; <5% tvål och fosfonater.

Kemiska/fysiska data

Granuler:	
Utseende	Ofärgade till lätt guldfärgade granuler
Volymvikt	ca 800 g/l
Lagringstemperatur	-5 °C till rumstemperatur
Brukslösning	
Utseende	Färglös
pH	ca 3,8

Bruksanvisning

Fyll kärlet med vatten 20-25 °C. Strö därefter ner granulerna i vattnet och rör om. T.ex.

1 x 40 g påse i 4 liter vatten = 1% lösning

1 x 40 g påsar i 2 liter vatten = 2% lösning

Medicinsk utrustning och andra ytor desinficeras med en trasa fuktad med lösningen.

För att desinficera masker och övningsdockor läggs de isärplockade delarna ner i lösningen. När den rekommenderade kontakttiden är uppnådd sköljs delarna av med vatten.

Perform[®] har utmärkta rengöringsegenskaper. Det är därför inte nödvändigt att tillsätta andra rengöringsmedel.

Beredd lösning behåller sina desinficerande och rengörande egenskaper under en arbetsdag. Vi rekommenderar dock byte av lösning innan behandling av svårare fläckar.

Märkning

Xi	Irriterande
R 36/38	Irriterar ögonen och huden
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S 28	Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Kontakttider	5 min	10 min	30 min	1 tim	2 tim	4 tim
Ytdesinfektion på sjukhus			1%	0,5%		0,25%
ÖGHMP No 95/14			1%	0,5%		0,25%
TB			3%	2%		1,5%
Fullt virucid			2%			
Virusinaktiverande (inkl. HIV,HBV,HCV)		2%				
Adenovirus	0,5%					
Poliovirus			2%			
Vaccinia virus	0,5%					
Polyoma SV 40	0,5%					
Rotavirus	0,5%					
Norovirus	0,25%					
Sporer					1%	



Redan testad enligt EU-standarder inom områden för livsmedel, industri och institutioner

	30 min	60 min
EN 13697 Kvantitativ provning för baktericid effekt på ej porösa ytor, med/utan mekanisk påverkan.	0,5% (5 g/l)	
EN 13697 Kvantitativ provning för fungicid effekt på ej porösa ytor, med/utan mekanisk påverkan.		1% (10 g/l)

